

## **EYEEYE All in One lätsehooldusvedelik provitamiiniga B5.**

Puhastamiseks, desinfitseerimiseks, säilitamiseks, niisutamiseks, loputamiseks, valgujääkide eemaldamiseks ning silmahoolduseks.

Pehmetele kontaktläätsedele.

### **Koostis:**

Aktiivne koostisosa: poloksamiin 1%, HydraFlex™ 0,3%, provitamiin B5 1,5%.

Säilitusaine: polüheksaniid 0,0001%.

**EYEEYE All in One B5** lätsehooldusvedelik on uus toode pehmete kontaktläätsede põhjalikuks hoolduseks. Puhastamine, valgujääkide eemaldamine, loputamine, desinfitseerimine, säilitamine, niisutamine ja silmahooldus – kõik ühes pudelis! **EYEEYE All in One B5** lätsehooldusvedelik toidab, kaitseb ja toetab silma pinda sel ajal kui lätse kannate tänu oma ainulaadsele koostisele provitamiiniga B5. HydraFlex, mis koosneb erinevate komponentide ühendist, tagab valgujääkide eemaldamise kontaktläätselt.

### **Kasutusjuhend:**

Teie läätsede korralikuks igapäevaseks hoolduseks on vajalik:

- Hügieen: peske hoolikalt oma käed enne kui võtate läätsed silmast või lätsekonteinerist. Kuivatage käed kasutades puhast rätikut.
- Loputamine: loputage läätsed hoolikalt **EYEEYE All in One B5-ga** ning asetage läätsed lätsekonteinerisse.
- Desinfitseerimine ja säilitamine: täitke lätsekonteiner **EYEEYE All in One B5-ga** ning jätke läätsed konteinerisse vähemalt 4 tunniks.
- Silmapanek: eemaldage läätsed konteinerist pärast desinfitseerimistsükli, loputage läätsed **EYEEYE All in One B5-ga** ning asetage läätsed silma. Loputage lätsekonteiner **EYEEYE All in One B5-ga** ning laske konteineril õhu käes kuivada.
- Niisutamine: kui Teid häirib kerge ärritus läätsede kandmisel, tilgutage piisk **EYEEYE All in One B5-e** silma ning pilgutage mitu korda. Võite lätse silma jätta. Probleemide jätkumisel konsulteerige oma kontaktläätsespetsialistiga.
- Puhastamine tugevate valgujääkide korral: asetage lääts peopessa. Seejärel kandke mõned tilgad **EYEEYE All in One B5-e** lätsele ning hõõruge ettevaatlikult lätse umbes 10 sekundit.

### **Hoiatus:**

Pudeli sisu kasutada 2 kuu jooksul pärast avamist.

Mitte kasutada pärast aegumiskuupäeva.

Säilitada temperatuurivahemikus 4°C kuni 25°C.

Sulgeda pudel kohe pärast kasutamist.

Saastumise vältimiseks pudeli otsa mitte puutada.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kui Teile on väljakirjutatud silmaravimeid, konsulteerige eelnevalt oma silmaarsti või kontaktläätsespetsialistiga ravimi kasutamist koos kontaktläätsedega.

### **Kasulikud nõuanded kontaktläätsede ja lätsekonteineri õige kasutamiseks:**

Puhtaks ja steriilseks tarvitamiseks soovime kasutada uut kontaktlätsekonteinerit iga uue pudeli korral või vähemalt iga kolme kuu tagant.

Visake järelejäänud hooldusvedelik kohe ära. Seejärel loputage kontaktlätsekonteinerit põhjalikult **EYEEYE All in One B5-ga** (desinfitseerimiseks) ning laske õhu käes kuivada. Ärge kuivatage konteinerit riidega.

Vältige kraanivee kasutamist läätsede ja kontaktläätsekonteineri puhul.  
Pärast pikaajalist säilitamist (üle 7 päeva) tuleb läätsi enne kandmist puhastada ja desinfitseerida.  
Avage pudel keerates korki vasakule, et murda garantiitempel. Enne kasutamist kontrollige alati garantiitemplit.

**Kõrvalmõjud:**

Ärge kasutage **EYEE All in One B5-e**, kui olete allergiline mõnele läätsesehooldusvedeliku koostisainele.