

KÄESOLEV DOKUMENT SISALDAB OLULIST TEAVET TOOTE KASUTAMISE JA OHUTUSE KOHTA. LUGEGE JUHISED HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE NEED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES. KONTAKTLÄÄTSEDE EBAÕIGE HOOLDUS VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID SILMAPROBLEEME.

SOLO-CARE AQUA on „kõik ühes” mitmeotstarbeline desinfitseeriv läätsehooldusvedelik igat tüüpi pehmetele kontaktläätsedele, mis puhastab, loputab, desinfitseerib, säilitab, eemaldab valku ja libestab.

KIRJELDUS

Isotooniline veepõhine mikroobidevastane/antibakteriaalne* vedelik, mis sisaldab toime- ja säilitusainena 0,0001% polüheksaniidi, Hydrolocki (dekspantenool ja sorbitool), naatriumfosfaati, trometamiini, poloksameer 407 ja dinaatriumedetaati.

STERILE A

Valmistamisel on kasutatud aseptilist menetlust.

Ei sisalda kloorheksidiini ega tiomersaali.

Antud läätsehooldusvedelik ja MicroBlock™ antibakteriaalne hõbedat sisaldav läätsekonteiner, on kõik, mida vajate kontaktläätsede õigeks ja igakülgses hoolduseks.

SOLO-CARE AQUA vedelikku võib kasutada kahel viisil:

- ilma hõõrumise/loputamiseta
- 5-minutilise käsitsusena

Et läätsed saaksid korralikult desinfitseeritud, järgige hoolikalt juhiseid.

ILMA HÕÕRUMISE/LOPUTAMISETA

- Enne läätsede käsitlemist peske alati käed puhtaks ja kuivatage need puhta rätikuga.

Segaduse vältimiseks alustage alati samast silmast!

- Avage läätsekonteiner.
- Asetage lääts konteinerisse ja täitke üks pool märgitud tasemeni **SOLO-CARE AQUA** vedelikuga.
- Asetage kaas tagasi kohale ja keerake kinni.

Korrake protseduuri teise läätsega.

- **LASKE LÄÄTSEDEL LIGUNEDA VÄHEMALT 4 TUNDI.** Hõõrumine või loputamine enne likkupanekut pole vajalik.
- Läätsed on nüüd puhtad ja desinfitseeritud ning võite need silma panna.
- Parima tulemuse saavutamiseks loputage läätsi enne silmapanekut **SOLO-CARE AQUA** vedelikuga.
- Visake läätsekonteineris olev vedelik minema ja loputage konteinerit **SOLO-CARE AQUA** vedelikuga. Jätke läätsekonteiner lahti ja laske sel õhu käes kuivada.
- Kui läätsi on enne kasutamist hoitud üle 30 päeva **SOLO-CARE AQUA** vedelikus, visake konteineris olev vedelik minema ja korrake enne läätsede kasutuselevõtmist uuesti eespool kirjeldatud protseduuri.

5-MINUTILINE KÄSITSUS

- Enne läätsede käsitlemist peske alati käed puhtaks ja kuivatage need puhta rätikuga. Segaduse vältimiseks alustage alati samast silmast!
- Avage läätseskonteiner.
- Võtke lääts silmast ja asetage peopesale.
- Tilgutage lääts mõlemale poolele vähemalt 3 tilka **SOLO-CARE AQUA** vedelikku.
- Hõõruge lääts vähemalt 10 sekundit õrnalt ringikujuliste liigutustega.
- Loputage lääts hoolikalt **SOLO-CARE AQUA** vedelikuga, hõõrudes seda samal ajal vähemalt 10 sekundit õrnalt põidla ja nimetissõrme vahel.
- Asetage lääts läätseskonteinerisse ja täitke teine pool märgitud kõrguseni värske **SOLO-CARE AQUA** lahusega.
- Asetage kaas tagasi kohale ja keerake kinni.

Korrake protseduuri teise läätsesega.

- **LASKE LÄÄTSEDEL LIGUNEDA VÄHEMALT 5 MINUTIT.**
- Läätsed on nüüd puhtad ja desinfitseeritud ning võite need kohe silma panna.
- Parima tulemuse saavutamiseks loputage läätsi enne silmapanekut **SOLO-CARE AQUA** vedelikuga.
- Visake läätseskonteineris olev vedelik minema ja loputage konteinerit **SOLO-CARE AQUA** vedelikuga. Jätke läätseskonteiner lahti ja laske sel õhu käes ära kuivada.
- Kui läätsi on enne kasutamist hoitud üle 30 päeva **SOLO-CARE AQUA** vedelikus, visake konteineris olev vedelik minema, korrake enne läätsede kasutuselevõtmist eespool kirjeldatud viisil käsitsi puhastamise protseduuri ning desinfitseerige läätsi enne kasutamist vähemalt 5 minutit **SOLO-CARE AQUA** lahuses.

VASTUNÄIDUSTUSED (*põhjused, mis takistavad kasutamist*)

- Ärge kasutage toodet, kui olete selle mõne koostisaine suhtes allergiline.
- Ärge kasutage kaasasolevat läätseskonteinerit, kui olete hõbeda suhtes allergiline.
- Ärge kasutage **SOLO-CARE AQUA** kuumdesinfitseerimiseks.

OHUTUSJUHISED

- Ärge kasutage pärast kõlblikkusaja lõppu.
- Enne esmakordset kasutamist veenduge, et pudeli pitser on terve. Kui pitser on lahti, ärge toodet kasutage.
- Pärast kasutamist sulgege pudel.
- Lahus tuleb pärast pudeli avamist ära kasutada 3 kuu jooksul. Kui osa vedelikku on veel alles, tuleb see ära visata.
- Vältige pudelisuu puutumist millegi vastu, kuna vastasel korral võib vedelik saastuda.
- Uue **SOLO-CARE AQUA** pudeli kasutuselevõtmisel vahetage alati välja ka läätseskonteiner.
- Hoida temperatuuril alla 25° C.
- Mitte hoida otsese päikesevalguse käes.
- Enne üleminekut teisele vedelikule pidage alati nõu läätsede müüjaga.

HOIATUSED

- Kasutage alati värsket **SOLO-CARE AQUA** vedelikku. Ärge kasutage läätseskonteineris olevat vedelikku kunagi teist korda.

- Ärge lahjendage ega segage **SOLO-CARE AQUA** vedelikku **KUNAGI** ühegi teise vedelikuga, sest see võib **SOLO-CARE AQUA** toime nullida.

- **Ärge laske kontaktläätsedel kokku puutuda steriliseerimata veega (kaasa arvatud kraaniveega), kuna vees leiduvad mikroorganismid võivad läätsede pinnale sattudes põhjustada pöördumatuid silmakahjustusi.**

- **KASUTAGE ALATI SOLO-CARE AQUA SÜSTEEMI OSI, SEALHULGAS LÄÄTSEKONTEINERIT. ÄRGE ASENDAGE KOMPONENTE TEISTE LÄÄTSEHOOLDUSSÜSTEEMIDE OSADEGA.**

- **HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.**

- Enne ravimite kasutamist koos kontaktläätsedega pidage nõu arsti või optometristiga.

KÕRVALTOIMED

Kui tunnete silmades jätkuvalt ebamugavustunnet või ärritust, võtke kontaktläätsed silmast, lõpetage toote kasutamine ja pidage nõu silmaarsti või optometristiga.

Microblock™ LÄÄTSEKONTEINER

Antibakteriaalne läätseskonteiner Microblock võib aja jooksul teatud määral värvi muuta. See ei vähenda konteineri mikroobidevastast toimet. Sarnaselt kõigile läätseskonteineritele, on ka see läätseskonteiner soovitatav uue **SOLO-CARE AQUA** pudeli kasutuselevõtmisel või vastavalt läätsede müüja soovitusel alati välja vahetada.

PAKENDISUURUSED

SOLO-CARE AQUA vedelik on saadaval 60 ml, 120 ml ja 360 ml pudelites. Kõigi pakendisuuruste juurde kuuluvad läätseskonteinerid.

*ISO 14729-s loetletud silmahaigusi põhjustavate bakterite- ja mikroorganismidevastane toime

M = Tootja: CIBA Vision Corporation, Duluth, Georgia, 30097, USA

ER = Esindaja Euroopa Liidus:

CIBA Vision GmbH, Postfach 4,63868, Grosswallstadt, Saksamaa

Edasimüüja: CIBA Vision Nordic AB, Datavägen 24, S - 436 32 Askim

23312001 1/2005 Versioon 3 (14-08-04)