

**KÄESOLEV PAKENDI INFOLEHT SISALDAB OLULIST TEAVET TOOTE KASUTAMISE JA OHUTUSE KOHTA. LUGEGE SEE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES. TOOTE EBAÕIGE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID SILMAPROBLEEME.**

**SOLO-CARE SOFT ON „KÕIK-ÜHES” LÄÄTSEHOOLDUSVEDELIK**, mis eemaldab valku, puhastab, loputab, desinfitseerib, säilitab ja libestab igat tüüpi pehmeid kontaktläätsi kõigest 10 minutiga.

### **TOOTE KIRJELDUS**

Isotooniline veepõhine vedelik, mis sisaldab toime- ja säilitusainena 0,0001% polüheksaniidi, naatriumkloriidi ja TRI-KLENS™ kolmetoimelist valgueemaldussüsteemi (poloksameer 407, dinaatriumvesinikfosfaat, dinaatriumedetaat ja naatriumdivesinikfosfaat).

STERILE A

Kasutatud aseptilist tootmismenetlust.

Ei sisalda kloorheksidiini ega tiomersaali.

Käesolev vedelik sisaldab kõike, mis on vajalik kontaktläätsede õigeks ja igakülgsesks hoolduseks.

### **KASUTAMISÕPETUS**

Et läätsed saaksid korralikult desinfitseeritud, järgige hoolikalt juhiseid.

- Enne läätsede käsitlemist peske alati käed puhtaks ja kuivatage need puhta rätikuga. Segaduse vältimiseks alustage alati samast silmast!
- Avage läätseskonteiner.
- Võtke kontaktlääts silmast ja asetage see peopesale.
- Tilgutage läätses mõlemale poolele vähemalt 3 tilka **SOLO-CARE SOFT**'i .
- Hõõruge läätses **10 sekundit ettevaatlikult mõlemalt poolt päri-ja vastupäeva**.
- Loputage läätses hoolikalt **SOLO-CARE SOFT**'iga, hõõrudes seda samal ajal ettevaatlikult pöidla ja nimetissõrme vahel.
- Asetage läätses läätseskonteinerisse ja täitke süvend märgitud kõrguseni **SOLO-CARE SOFT**'iga.
- Asetage kaas tagasi kohale ja keerake kinni.

Korrake protseduuri teise läätsesga.

- **LASKE LÄÄTSEDEL VÄHEMALT 10 MINUTIT LIGUNEDA.**
- Läätses on nüüd puhtad ja desinfitseeritud ning võite need kohe silma panna.
- Visake kasutatud vedelik konteinerist minema ja loputage konteinerit **SOLO-CARE SOFT**'iga. Laske läätseskonteineril õhu käes lahtiselt kuivada.
- Kui läätses on enne kasutamist hoitud üle 4 nädala **SOLO-CARE SOFT**'is, tuleb konteineris olev vedelik minema visata ning läätses enne kasutuselevõtmist eespool kirjeldatud viisil käsitsi uuesti puhastada ja vähemalt 10 minutit **SOLO-CARE SOFT**'iga desinfitseerida.

**VASTUNÄIDUSTUSED** (*põhjused, mis takistavad kasutamist*)

- Ärge kasutage toodet, kui olete selle mõne koostisaine suhtes allergiline.

- Ärge kasutage **SOLO-CARE SOFT**'i kunagi kuumdesinfitseerimiseks.

### **OHUTUSJUHISED**

- Ärge kasutage pärast kõlblikkusaja lõppu.
- Enne esmakordset kasutamist veenduge, et pudeli pitser on terve. Kui pitser on lahti, ärge toodet kasutage.
- Pärast kasutamist sulgege pudel.
- Lahus tuleb pärast pudeli avamist ära kasutada 3 kuu jooksul. Kui osa vedelikku on veel alles, tuleb see ära visata.
- Vältige pudelisuudme puutumist millegi vastu, kuna vastasel korral võib vedelik saastuda.
- Uue **SOLO-CARE SOFT**'i pudeli kasutuselevõtmisel vahetage alati välja ka läätseskonteiner.
- Hoida temperatuuril alla 30 °C.
- Enne teisele vedelikule üleminekut pidage alati nõu kontaktläätsede müüjaga.

### **HOIATUSED**

- Kasutage alati värsket **SOLO-CARE SOFT**'i vedelikku – ärge kasutage läätseskonteineris olevat vedelikku kunagi teist korda.
- Ärge lahjendage ega segage **SOLO-CARE SOFT**'i vedelikku **KUNAGI** ühegi teise vedelikuga, sest see võib **toote** toime nullida.

**• Ärge laske kontaktläätsedel kokku puutuda steriliseerimata veega (kaasa arvatud kraaniveega), kuna vees leiduvad mikroorganismid võivad läätses pinnale sattudes põhjustada pöördumatuid silmakahjustusi.**

**• KASUTAGE ALATI SOLO-CARE SOFT**'i SÜSTEEMI OSI, SEALHULGAS LÄÄTSEKONTEINERIT. ÄRGE ASENDAGE KOMPONENTE TEISTE LÄÄTSEHOOLDUSSÜSTEEMIDE OSADEGA.

### **• HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.**

- Enne ravimi kasutamist koos kontaktläätsedega pidage nõu arsti või optometristiga.

### **VASTUREAKTSIOONID**

Kui tunnete silmades jätkuvalt ebamugavustunnet või ärritust, võtke kontaktläätsed silmast, lõpetage toote kasutamine ning pidage nõu silmaarsti või optometristiga.

### **PAKENDISUURUSED**

**SOLO-CARE SOFT** on saadaval 60 ml, 120 ml ja 360 ml pudelites. Kõigi pakendisuuruste juurde kuuluvad läätseskonteinerid.

M = Tootja: CIBA Vision Corporation, Duluth, Georgia, 30097, USA

ER = esindaja Euroopa Liidus: CIBA Vision GmbH., Postfach 4, 63868, Grosswallstadt, Saksamaa

Edasimüüja: CIBA Vision Nordic AB, Datavägen 24, S-436 32 Askim 23311200