

OPTIFOG[®] ACTIVATOR

TOIME KESTVUS

Normaalingimustes ja regulaarselt kord nädalas Optifog Activatoriga Optifog läätsede aktiveerides on udu moodustumine prilliläätsel viidud miinimumini kuni nädalaks. Kui Optifog läätsede uduvastane omadus nõrgeneb, aktiveeri need uuesti. Veepõhised vedelikud eemaldavad Optifog Activatori prilliläätsedelt. Optifog läätsed tuleb uuesti aktiveerida ka siis, kui neid puhastatakse teiste vedelikega, kui neid hõõrutakse lapiga temperatuuri ühtlustumise ajal (veekirme staadiumis) või kui nendega viibitakse tiheda saju korral õues.

PUHASTAMINE

Puhasta Optifog läätsesid ainult kuiva mikrofiiberlapiga (see on stardipakis kaasas). Kui prilliläätsed on väga mustad, puhasta need eelnevalt ja alles siis kasuta Activatorit. Ära kasuta paberit (majapidamispaper, wc paber), kangast (lips, särk) või ammoniaagi-põhiseid vedelikke Optifog läätsede puhastamisel!

SOOVITUSED JA HOIATUSED

Välgi kontsentraadi sattumist silma!

Kui Optifog Activator satub silma, pese neid rohke veega.

Ära joo kontsentraati!

Selle allaneelamise korral mitte esile kutsuda oksendamist. Jooge tass vett või piima.

Hoidke vedelik lastele kättesaamatus kohas!

Ära hingata sisse kontsentraadi aurusi!

Nende sissehingamisel mine värske õhu kätte.

Välgi Optifog Activatori sattumist nahale!

Pikaajalise nahakontakti korral pese seebi ja külma veega.

SÄILITUS

Säilita Optifog Activator temperatuuril 5-55 *C.

Kui kontsentraat jäätub, sulatage see toatemperatuuril ja raputage hoolega enne kasutamist.

Säilivusaeg on 3 aastat alates valmistuspäevast.